




Anwendung FreVAX™

KURZANLEITUNG

Diese Kurzanleitung gibt einen Überblick über die wichtigsten Schritte zur Inbetriebnahme und Anwendung von FreVAX™, sowie zur Reinigung des Gerätes nach dem Gebrauch.

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme bitte die vollständige Bedienungsanleitung, um Risiken zu vermeiden!


1

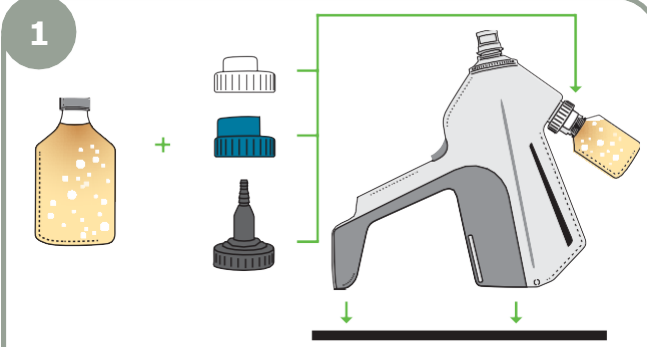

Fl. + Wähln → Montieren

Flasche und passenden Adapter verbinden, Gerät in o.g. Ausrichtung hin stellen und Flasche montieren.

2

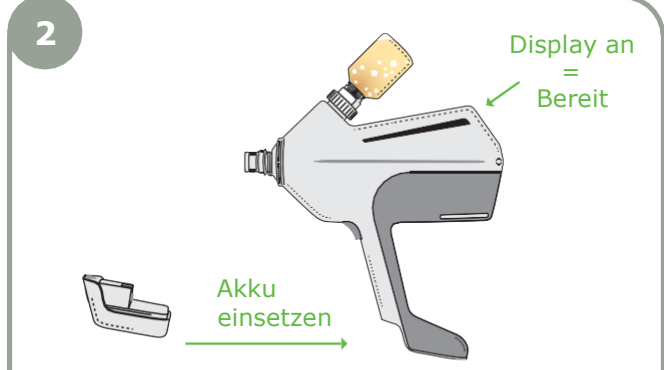


Akku einsetzen

Display an = Bereit

Durch Einsetzen des Akkus wird das Gerät aktiviert. Der Startbildschirm erscheint für 1 Sekunde.

3

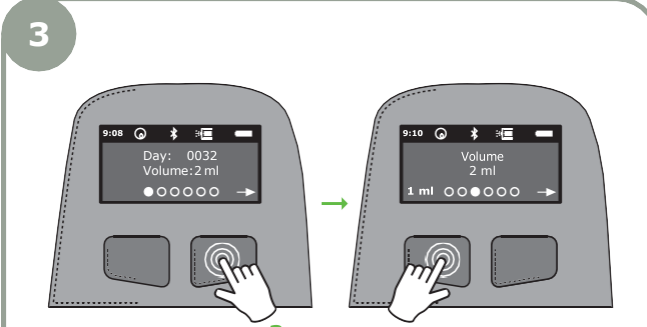


Startbildschirm

3x

Auswahl 1 ml/2 ml

Mit dem re. Knopf bewegen Sie sich durch das Menü. Mit dem li. Knopf nehmen Sie Änderungen vor.

4

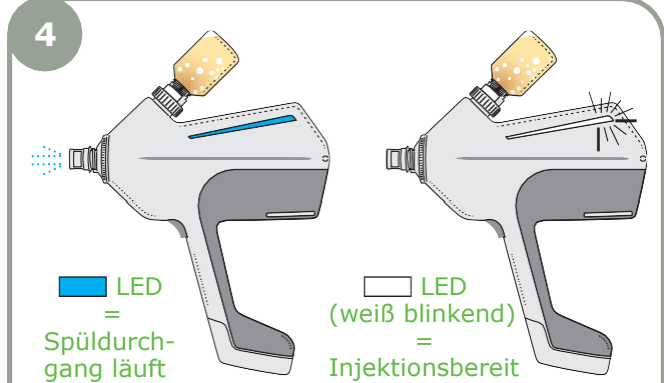


LED = Spüldurchgang läuft

LED (weiß blinkend) = Injektionsbereit

Nach Auswahl der richtigen Dosis Trigger drücken und halten, um den Injektor zu befüllen (3 Zyklen).

5

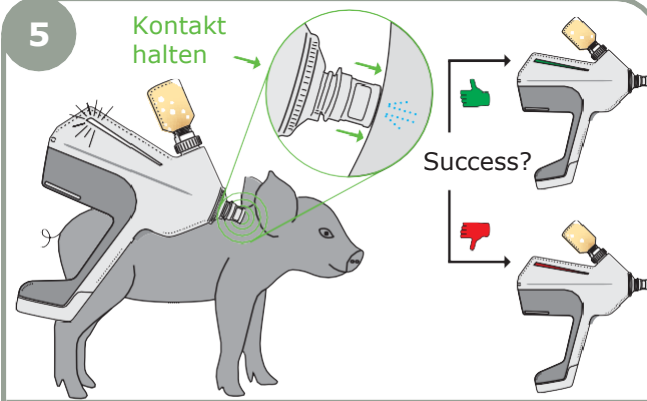


Kontakt halten

Success?

Trigger drücken und halten, anschließend Gerät gegen Haut drücken, um eine Injektion auszulösen.

6

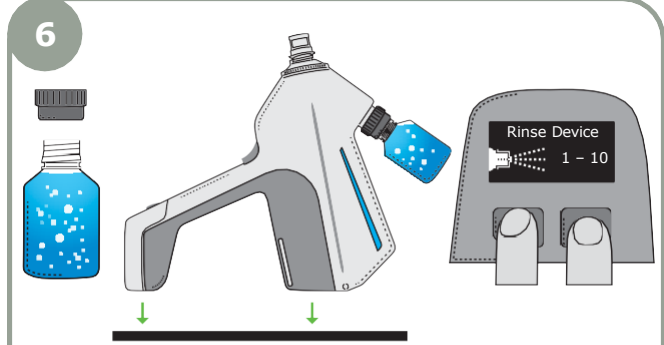

Fl. + Montieren → 3 Sek. drücken

Rinse Device 1 - 10

Nach Nutzung ein Reinigungsmittel montieren und Spülprogramm starten (3 Sek. beide Knöpfe drücken).